


# Návod k použití přípravku NextDent Cure

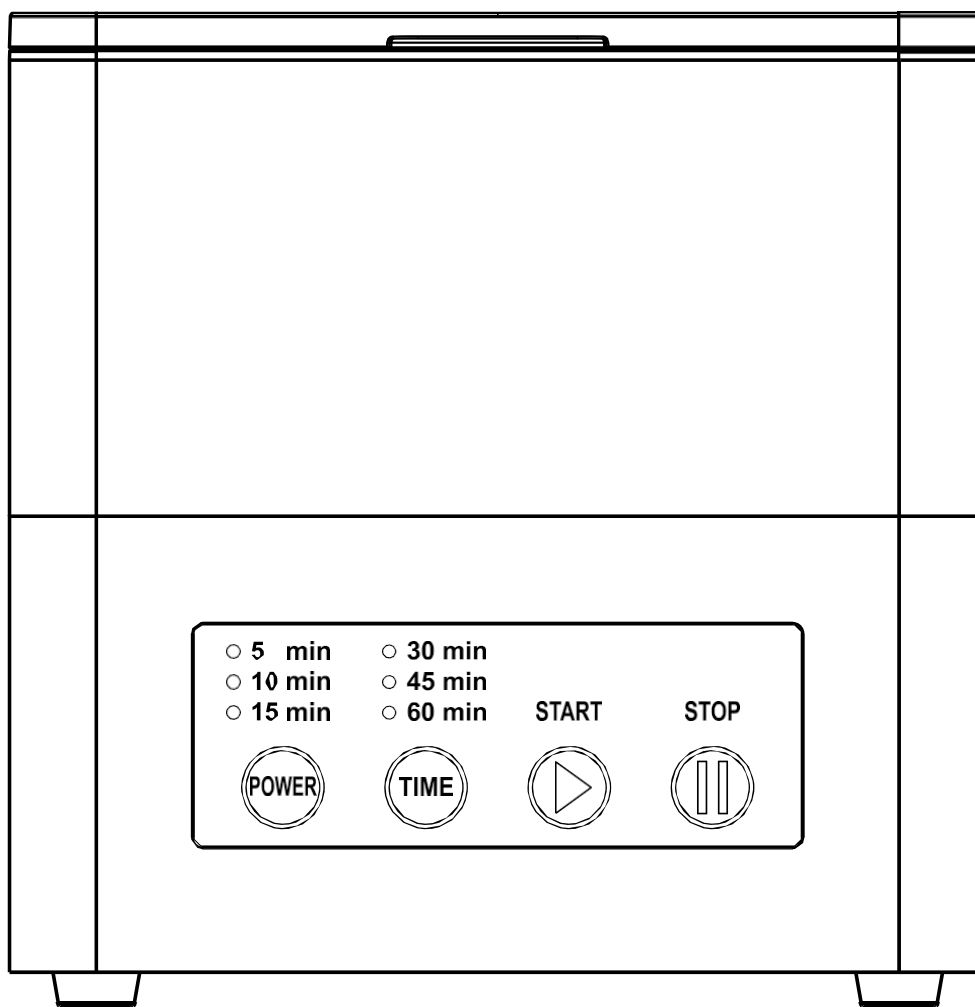


### Popis

NextDent Cure je 3D UV vytvrzovací jednotka používaná k následnému zpracování 3D tištěných objektů.

### Komponenty


Hlavní tělo, lampa, síťový kabel

### Příslušenství a náhradní díly

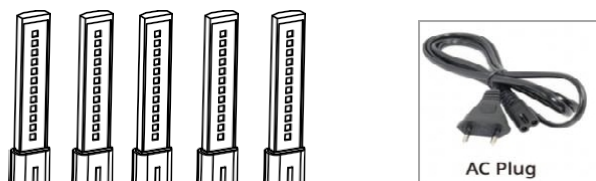

5ea LED svítidel Zástrčka AC

### Instalace

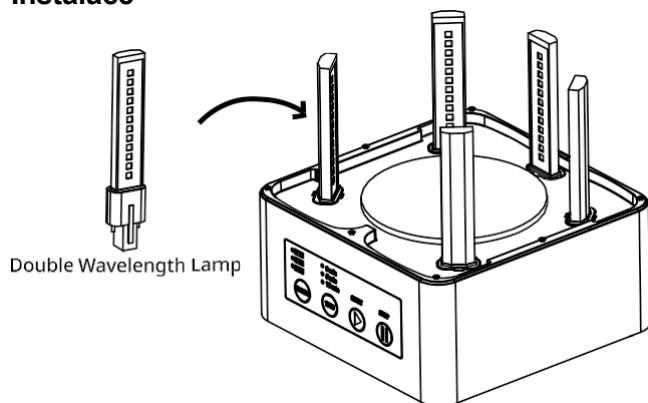

1. Zkontrolujte síťovou zástrčku a LED lampu dodanou s přístrojem NextDent Cure.
2. Zasuňte LED lampu do příslušného vstupu uvnitř přístroje NextDent Cure.
3. Zasuňte síťovou zástrčku do příslušné zásuvky za přístrojem NextDent Cure.
4. Spusťte zařízení.

### Provozní proces

<input type="radio"/> 5 min	<input type="radio"/> 30 min		
<input type="radio"/> 10 min	<input type="radio"/> 45 min		
<input type="radio"/> 15 min	<input type="radio"/> 60 min	<b>START</b>	<b>STOP</b>

**Čas**

5min / 10min / 15min / 30min / 45min / 60min.

**Provozování**

1. Stiskněte tlačítko POWER.
2. Dobu vytvrzování zvolte s ohledem na materiál a tvar tištěného výstupu.
3. Stiskněte tlačítko START pro aktivaci.
4. Po ukončení vytvrzování se operace zastaví a ozve se pípnutí.

**Bezpečnostní opatření**


- Chcete-li vytvrzování zastavit, stiskněte tlačítko STOP.
- Během provozu neměňte polohu zařízení NextDent Cure.
- Vyhněte se působení UV záření.
- Dbejte na to, abyste zařízení umístili tak, aby se snadno ovládalo.
- Používejte pouze autorizované příslušenství (např. napájecí kabel).
- Používejte rukavice a ochranu očí.
- Neupravujte: NextDent Cure je určen pouze k použití podle návodu.
- Pouze pro profesionální použití.

**Údržba čištění**

1. Vyčistěte vnitřek komory NextDent Cure a otřete ji hladkým čistým hadříkem.
2. Po vyčištění sestavte vyjmuté příslušenství.

**Bezpečnostní symbol**

Na zařízení a v tomto dokumentu jsou uvedeny následující symboly. Zařízení vždy používejte co nejbezpečnějším způsobem.

Symbol	Meaning
	Caution & Warning

 **UPOZORNĚNÍ: Při přemísťování jednotky nezapomeňte**

**vypnout napájení. Podmínky prostředí**

Instalace: vnitřní

Nadmořská výška: do  
2000 m

Provozní teplota / vlhkost: 0 - 40 °C / 20 - 80 %

**Balení**

Při otevírání buďte opatrní.

Obal si uschovejte.

Původní krabici si uschovejte pro další zásilky.

## Záruka

- MEDIFIVE poskytuje na NextDent Cure jednoletou záruku.
- Úpravy jednotky bez výslovného schválení a pokynů společnosti 3D Systems vedou ke ztrátě záruky a mohou vést k poškození stroje.
- Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi, který je vyškolen v údržbě elektrických zařízení a je obeznámen s tímto typem technologie. Servis je nutný, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozlití tekutiny nebo pádu předmětů do zařízení, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo bylo upuštěno. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za opravy způsobené nesprávným používáním.

## Otázky

- E-mail: [info@nextdent.com](mailto:info@nextdent.com)
- Obraťte se na místního prodejce.

## Specifikace

Model: Rozměry: 24(D) X 24(Š) X 25(V)  
cm Jmenovitý výkon: 65W  
Napětí: AC 200~240 V ~50 / 60 HZ  
Přechodné přepětí: 2 500 V  
STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ: 2  
Stupeň ochrany: I Výrobce: , Ltd.:  
MEDIFIVE Co., Ltd.

## Technický poradce

Výrobce: , Ltd.: MEDIFIVE Co., Ltd.  
324, Korea industrial complex, 84, Namdongdong-ro, Namdong-gu, Inčchon, Korejská republika  
Tell: +82-32-471-1528  
Web: [www.medifive.com](http://www.medifive.com)